



# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

**Аспіратор**  
ДИТЯЧИЙ

**EcoBreath**

**ROCKET**

model



**ArhiMED**  
innovation technologies

## Ви придбали чудовий девайс!

- Цей прилад є абсолютно новим засобом для очищення носика дитини. Очищає носик м'яко, ефективно і легко. Він дуже простий у використанні.
- Аспіратор оснащений трьома рівнями сили всмоктування, які можна регулювати відповідно до потреби. Максимальна сила всмоктування є абсолютно безпечною для немовляти.
- На вибір є різна приємна музика, для спокою малюка. Завдяки їй діти сприймають процедуру, як гру і не бояться аспірації.
- Пластикові резервуари та силіконові насадки для всмоктування, виготовлені з харчових матеріалів, і є повністю безпечними та гігієнічними.
- Корпус приладу виготовлено з м'якого силікону, що робить прилад водонепроникним.

## Техніка безпеки

- Цей виріб використовується лише для очищення носової порожнини немовляти/дитини.
- Не допускайте потрапляння в насадку твердих предметів розміром більше 2 мм
- Не допускайте ударів приладу (не кидайте прилад), щоб не пошкодити його.
- Використовуйте тільки аксесуари, надані виробником
- Цей виріб не є іграшкою. Будь ласка, зберігайте його в безпечному місці і не дозволяйте дітям гратися ним.

### Запобіжні заходи перед використанням

Перед використанням рекомендується ретельно промити силіконові насадки та пластикові резервуари для збору слизу під струменем гарячої води.

При необхідності, для більш ретельної очистки, можна їх замочити в теплому мильному розчині на 10-15хв, після чого треба їх промити під гарячою водою та висушити (дати просохнути) перед встановленням на прилад.

Використовуйте для дезінфекції силіконових насадок та пластикових резервуарів кип'ячу воду або пар. Не занурюйте весь виріб у рідину.

Якщо зовнішній корпус приладу забруднився, протріть його або промийте під проточною водою при цьому, резервуар для виділень "3" та силіконовий ковпачок "2" (див. малюнок, ст. 3) мають бути встановлені на прилад під час промивання. (без повного занурювання у воду на тривалий час)

**ПОРАДА:** Для кращої очистки носика дитини, перед початком процедури аспірації, рекомендується закапати ніс дитини сольовим розчином чи Хьюмером (або аналогами) і, через 1 хв після цього, починати процедуру.

## Догляд за аспіратором

- Будь ласка, для очищення електронного корпусу прилада, використовуйте лише вологі тканини або серветки (можна на спиртовій основі)
- Насадки для всмоктування та контейнер для збору слизу можна дезінфікувати лише у теплому мильному розчині або у легкому спиртовому розчині
- Не зберігайте виріб під прямими сонячними променями та у надто вологому середовищі.
- Не використовуйте агресивні хімічні речовини для чищення цього виробу.

## Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням:

- ⚠ Під час використання переконайтеся, що рот дитини відкритий, щоб забезпечити циркуляцію повітря в носовій порожнині і уникнути дискомфорту.
- ⚠ Під час роботи назального аспіратора не перекривайте іншу ніздрю. Будь ласка, зверніть увагу на очищення насадок та резервуарів приладу перед кожним використанням.
- ⚠ Промивайте всмоктувальну силіконову насадку та прозорий пластиковий контейнер після використання.
- ⚠ Коли рівень носового слизу у пластиковому резервуарі досягає половини, його слід очистити перед подальшим використанням, щоб запобігти всмоктуванню носового слизу в двигун приладу.

## Параметри аспіратора

Product Name: Electric nasal absorber

Product Model: Ecobreath XS

Working voltage: 3.7

Charging voltage: DC 5V 1A


Maximum power: 3.5W

Battery capacity: 600mAh

Product net weight: 135g

Product size: L111\*W53.5\*H53.5mm

## Структура аспіратора

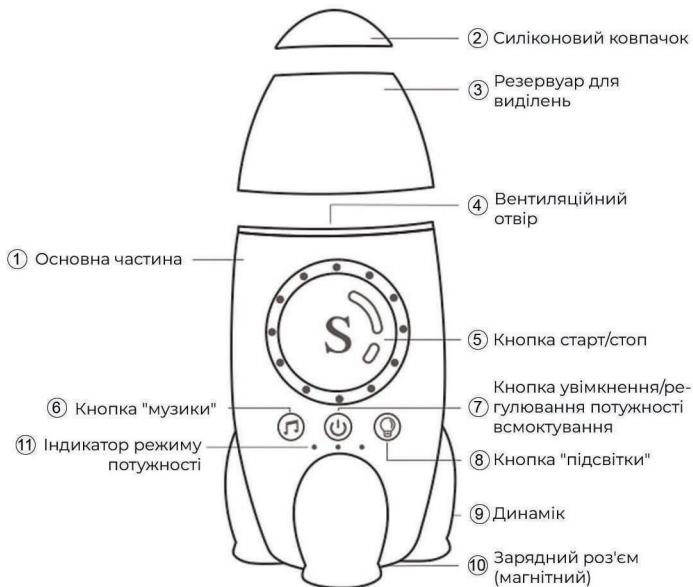

## Три змінні насадки



Використовуються для повсякденного проведення процедури дітям з 0 міс+. Використовуйте ту насадку, якою зручніше проводити процедуру. Це можна перевірити на практиці.

### Як правильно користуватися приладом:


- Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку ⑦, та утримуйте її 2 сек, щоб увімкнути прилад. Натисніть ще раз та утримуйте 2 сек, щоб вимкнути прилад;
- Регулювання сили всмоктування: Натисніть кнопку ⑦ коротко, щоб встановити інтенсивність всмоктування (від 1 до 3)
- Увімкніть музику: Натисніть кнопку ⑥ і утримуйте 2 сек, щоб увімкнути або вимкнути музику. Натисніть коротко для перемикання мелодій
- Старт всмоктування: натисніть кнопку ⑤, щоб почати всмоктування для очищення носової порожнини, і натисніть ще раз, щоб вимкнути всмоктування;
- Зарядка пристрою: Підключіть пристрій до USB-роз'єму для зарядки від джерела постійного струму 5 В 1 А, Наприклад, до зарядного блока мобільного телефона"
- Натисніть кнопку ⑧, щоб увімкнути або вимкнути підсвітку

## Усунення несправностей


-  Якщо виникають наступні проблеми, будь ласка, дотримуйтесь "Посібника з усунення несправностей". Якщо ви не можете їх вирішити самостійно, зверніться до відділу турботи ArhiMED.

| Проблема               | Вирішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Погано всмоктує        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Перевірте, щоб силіконові насадки були щільно встановлені</li><li>2. Перевірте, щоб пластиковий прозорий контейнер був щільно встановлений</li><li>3. Перевірте, чи не заблокований (забитий) вентиляційний та всмоктувальний отвір на самому приладі</li></ol> |
| Пристрій не вмикається | Будь ласка, зарядіть достатньо перед використанням                                                                                                                                                                                                                                                       |


## Як правильно робити процедуру?

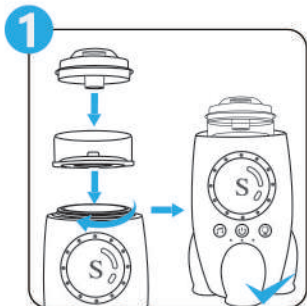


Закріпіть контейнер для збору слизу разом з верхньою кришкою в основному корпусі пристрою. Поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб затягнути

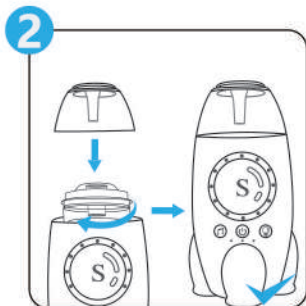

Зафіксуйте пластикову насадку контейнера для збору в основному корпусі і поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб затягнути.

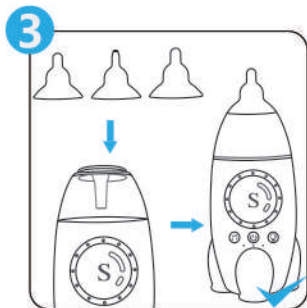


Виберіть потрібну силіконову насадку та встановіть її на збірний стакан.

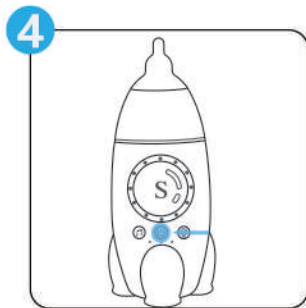


Натисніть кнопку живлення (увімкнення), та утримуйте 2 сек), щоб запустити пристрій.

5

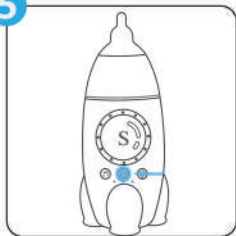


Налаштуйте потрібний режим (силу всмоктування) від 1 до 3. Здебільшого, зручно користуватися саме 3-м режимом для швидкого очищення

6

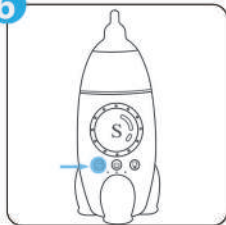

Натисніть кнопку "музика" і утримуйте 2 сек, щоб увімкнути або вимкнути музику. Натисніть ще раз (коротко, без утримання) для перемикання мелодій

7

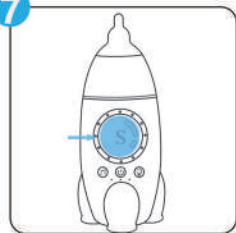

Натисніть кнопку «S» всмоктування, щоб почати всмоктування.


8




Помістіть кінчик силіконової насадки в носову порожнину малюка. М'якими круговими рухами зберіть слиз. Не притискайте дуже щільно кінчик насадки до стінки носа, так як це може завадити всмоктуванню. Для кращого результату, тримайте кінчик насадки «поверхнево» на відстані 0.5-1мм від стінки носа.



## Належне користування

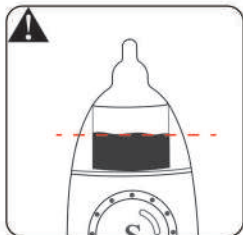


**Примітка:** При очищенні носика, коли вміст слизу в контейнері для збору перевищує половину об'єму, будь ласка, вийміть контейнер для збору та очистіть його перед подальшим використанням, інакше це легко призведе до потрапляння рідини у середину приладу, що може призвести до поломки.

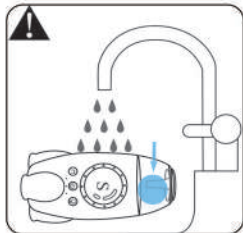

**Примітка:** Перед промивкою приладу, будь ласка, не знімайте пластиковий контейнер. Він запобігає потраплянню води у вентиляційний отвір приладу всередині.



**Примітка:** Будь ласка, використовуйте кип'ячу воду або пар для дезінфекції силіконових насадок та пластикових контейнерів для збору слизу. НЕ використовуйте мікрохвильові печі для дезінфекції.

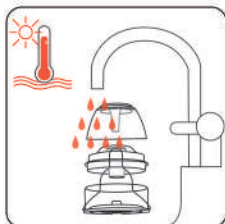

**Порада:** Після використання, будь ласка, вчасно очистіть всмоктувальну насадку та контейнер гарячою водою, щоб запобігти розмноженню бактерій. Дозволяється замочувати у мильному розчині.



**⚠ Гарантійний термін виробу починається з дати покупки.**

**Гарантія втрачає силу у випадках:**

- Використання приладу з порушенням вимог до експлуатації;
- При пошкодженні в результаті умисних або помилкових дій споживача;
- Наявності механічних або інших ушкоджень виробу;
- Проникнення рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- Розбирання або будь-якого іншого стороннього втручання в конструкцію приладу.

**⚠ Гарантія не поширюється на недоліки (несправності) виробу, спричинені наступними причинами:**

- Природним зносом частин, що мають обмежений термін служби;
- Дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь та ін.).

**Якщо у Вас є будь які питання по роботі приладу,  
або раптом щось не виходить -  
скоріше звертайтеся у відділ турботи ArhiMED:**



або



**+38 (073) 853 38 51**

**підтримка, сервіс, гарантія**