

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Електричний

молоковідсмоктувач



Gentle
S3

ARHIMED

Дякуємо, що обрали ARHIMED!

Електричний молоковідсмоктувач ARHIMED Gentle S3 призначений для домашнього використання. Його головна перевага — система трифазного зціджування (**Масаж → Стимуляція → Зціджування**), яка делікатно готує груди, стимулює приплив молока та робить процес максимально природним і безболісним.

Усі елементи, що контактують з молоком, абсолютно безпечні та не містять бісфенолу А (BPA-free)

Важлива примітка Ефективність зціджування є індивідуальною для кожної мами. Результат залежить від особливостей вашої лактації, регулярності використання приладу, а також від правильно підібраного режиму та рівня потужності.

Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Дотримання рекомендацій допоможе забезпечити правильну роботу приладу, комфорт під час процедури та безпечне зціджування грудного молока.

Зміст

Технічні характеристики.....	1
Комплектація.....	2
Призначення приладу.....	3
Як працює прилад.....	4
Кому підходить прилад.....	5
Протипоказання.....	6
Знайомство з приладом.....	7
Підготовка до процедури.....	8
Як зібрати прилад.....	9
Проведення процедури.....	10
Можливі проблеми та рішення.....	11
Очищення та дезінфекція.....	12
Зберігання та підігрів молока.....	13
Зберігання приладу.....	14
Гарантія та сервіс.....	15

1. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Матеріал	Медичний силікон та гіпоалергенний пластик
Гарантія	36 місяців
Сертифікація	Сертифіковано за міжнародними та українськими стандартами
Модель	ARHIMED Gentle S3
Тип	Електричний
Виробник	ARHIMED
Режими роботи	3 інтелектуальні трифазні режими: Масаж / Стимуляція / Зціджування
Рівні потужності	9 рівнів потужності
Рівень шуму	≤30 дБ
Живлення	Акумулятор 1200 mAh
Об'єм пляшечки для молока	180 мл
Час автономної роботи	До 150 хв

2. Комплектація

- Компресорний блок
- 5 пакетів для молока ARHIMED Gentle Bag
- Підставка для молоковідсмоктувача
- Адаптивна силіконова насадка
- Пилюзахисний ковпачок
- Основний з'єднувач
- Пляшечка для годування
- Кабель для зарядки
- Соска на пляшечку
- Діафрагма
- Інструкція
- Клапан

Важливо: перед першим використанням перевірте комплектацію та цілісність усіх деталей. У разі виявлення пошкоджень або відсутності елементів не використовуйте прилад.

3. Призначення приладу

Прилад призначений для зціджування грудного молока в домашніх умовах. **Сприяє підтриманню лактації**, формуванню запасу молока та полегшує годування немовляти у випадках,

коли пряме грудне вигодовування неможливе або тимчасово ускладнене.

Прилад призначений для індивідуального використання та не підлягає передаванню іншим особам з гігієнічних міркувань.

4. Як працює прилад

ARHIMED Gentle S3 працює за принципом трифазного зціджування, що імітує природний процес грудного вигодовування.

Прилад створює контрольоване розрідження за допомогою компресорного блока та передає його через силіконову мембрану на адаптивну насадку, формуючи м'які ритмічні імпульси, максимально наближені до природних смоктальних рухів немовляти.

Три фази послідовно змінюють одна одну, забезпечуючи повний цикл — від підготовки до ефективного зціджування.

Інтенсивність і тривалість роботи регулюються, доступно **9** рівнів потужності для індивідуального налаштування комфорту.

- **Масаж – м'які повільні імпульси**, що готують груди до зціджування, покращують кровообіг і сприяють запуску рефлексу віддачі молока.

- **Стимуляція** — швидкі легкі імпульси, що імітують початкові смоктальні рухи немовляти та активують приплив молока.

- **Зціджування** — глибші, повільніші та ритмічніші імпульси для основного ефективного зціджування молока. Саме ця фаза забезпечує максимальний об'єм за мінімальний час без дискомфорту.

М'яка силіконова насадка забезпечує делікатне прилягання, а низький рівень шуму (**30 дБ**) дозволяє використовувати прилад навіть поруч зі сплячою дитиною.

5. Кому підходить прилад

Прилад призначений для жінок, які годують грудьми та потребують періодичного зціджування молока.

Рекомендується для використання у таких випадках:

- підтримка лактації під час тимчасової розлуки з немовлям; формування запасу грудного молока;
- зменшення дискомфорту при наповненні грудей;
- годування зцідженим молоком, якщо пряме грудне вигодовування неможливе.

6. Протипоказання

Не використовуйте прилад без попередньої консультації з лікарем у таких випадках:


- запалення, мастит або тріщини сосків;
- інфекційні захворювання шкіри грудей;
- післяопераційний період у ділянці грудей;
- будь-які стани, при яких лікар забороняє зціджування.

Важливо: у разі виникнення сильного болю під час зціджування негайно припиніть використання приладу та зверніться до лікаря або консультанта з грудного вигодовування.

7. Знайомство з приладом


Кнопки керування

- **a** — Увімкнути / вимкнути прилад
- **b** — Зміна режиму: масаж / стимуляція / зціджування
- **c** — Збільшити рівень потужності
- **d** — Зменшити рівень потужності

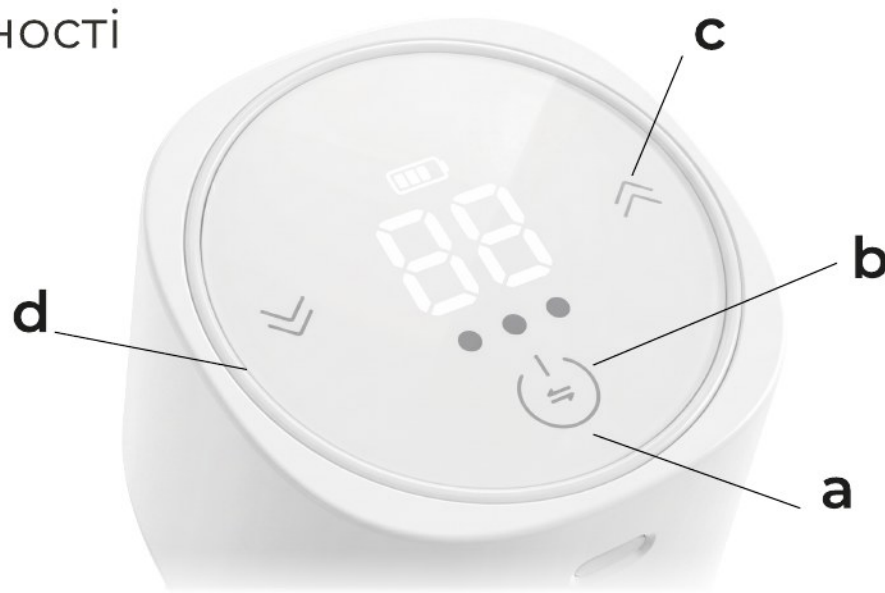

Індикатори LED-дисплея

- **a** — Режим масажу
- **b** — Режим стимуляції
- **c** — Режим зціджування
- **d** — Шкала 1–9 — поточний рівень потужності
- **e** — Іконка батареї

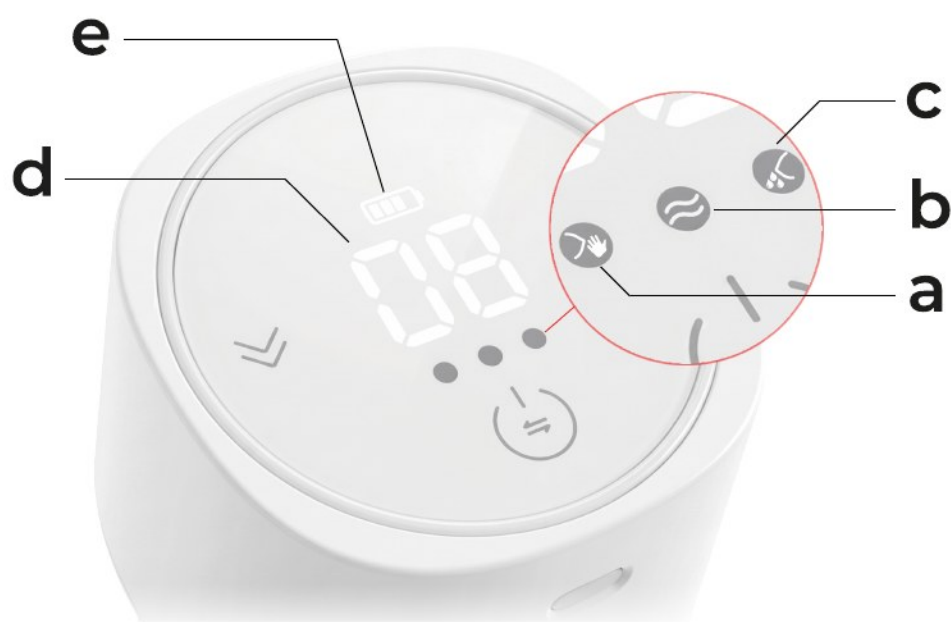


- **Іконка батареї блимає** — низький заряд акумулятора
- **Іконка батареї блимає під час заряджання** — прилад заряджається
- **Повна шкала батареї світиться стабільно** — заряджання завершено
- **Дисплей не світиться** — прилад вимкнено або повністю розряджено

Важливо: компресорний блок не є водонепроникним. Не мийте його під водою, не занурюйте та не протирайте всередині — це може призвести до поломки.

Посібник деталей

- 1. Пилозахисний ковпачок
- 2. Силіконова насадка
- 3. Основний з'єднувач
- 4. Діафрагма

- 5. Клапан
- 6. Пляшечка для годування
- 7. Соска на пляшечку
- 8. Компресорний блок

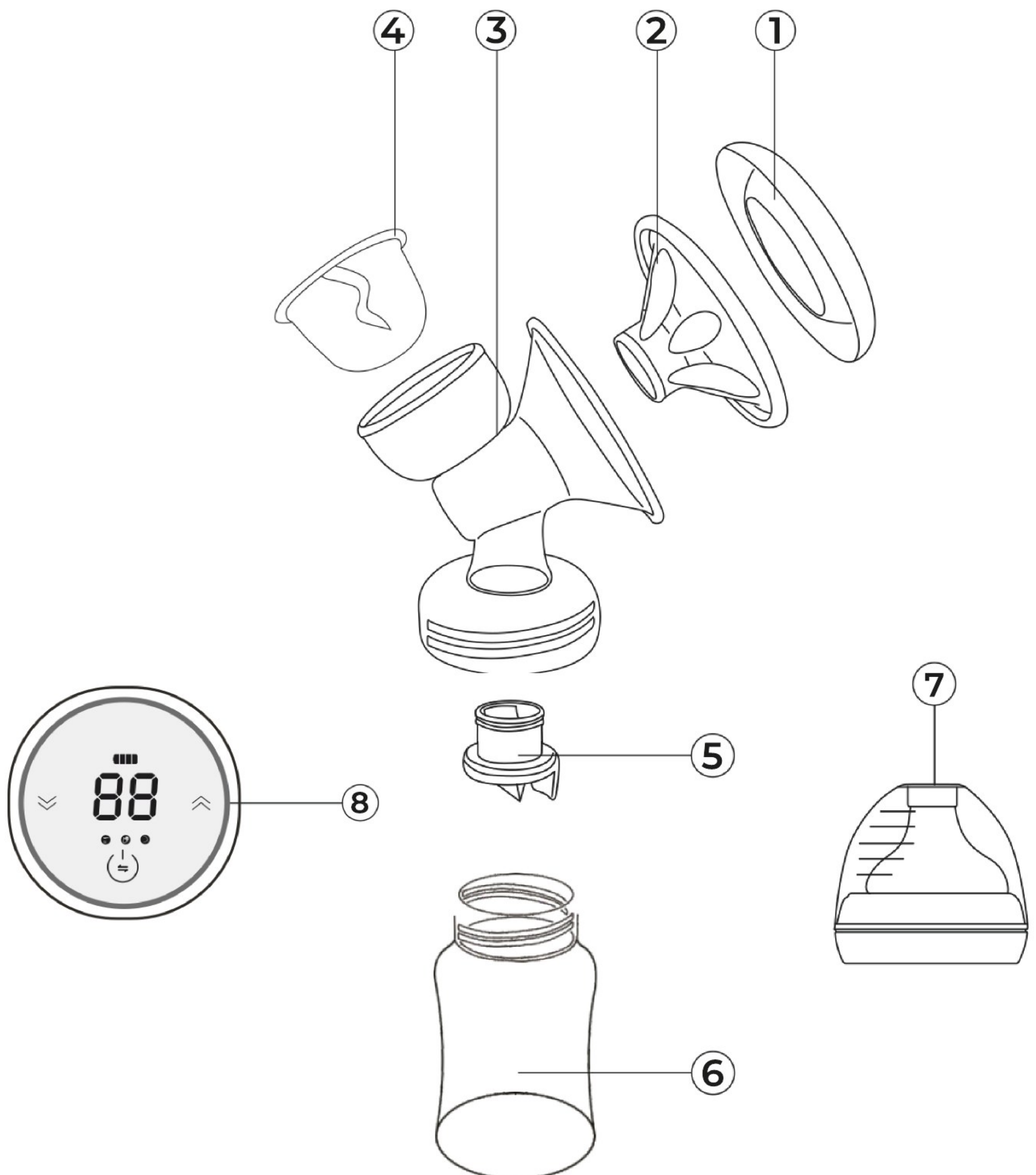


8. Підготовка до процедури

Перед першим використанням очистіть і продезінфікуйте всі деталі відповідно до розділу «Очищення та дезінфекція».


Перед кожним наступним використанням проводьте дезінфекцію деталей.

9. Як зібрати прилад

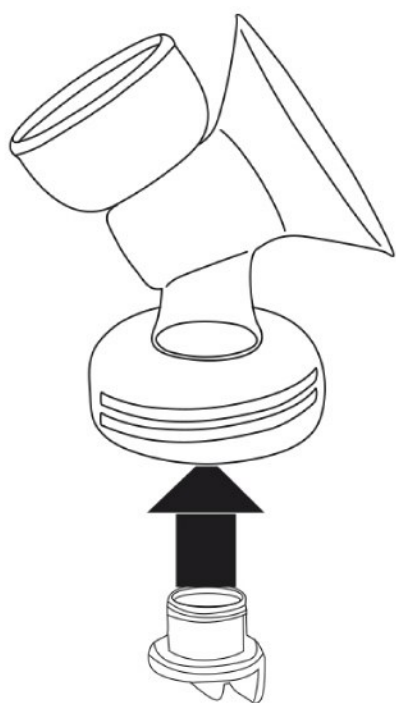

Вставте клапан **(5)** у роз'єм знизу основного з'єднувача **(3)**

Накрутіть з'єднувач **(3)** на пляшечку для годування **(6)** до повної фіксації

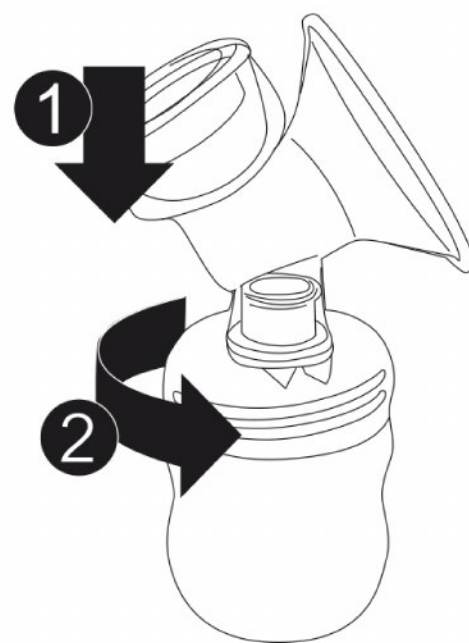

Важливо: якщо хоча б один елемент зафіксовано нещільно, це може знизити ефективність всмоктування.




Вставте діафрагму **(4)** у верхню частину з'єднувача **(3)**.

Притисніть діафрагму **(4)** донизу, щоб зафіксувати.

Вставте компресорний блок **(8)** у верхню частину з'єднувача **(3)**. Притисніть його вниз, щоб зафіксувати.



Покладіть силіконову насадку **(2)** у передній отвір з'єднувача **(3)** переконайтеся в щільному приляганні. **Для заряджання,** підключіть кабель живлення до компресорного блоку **(8)**.

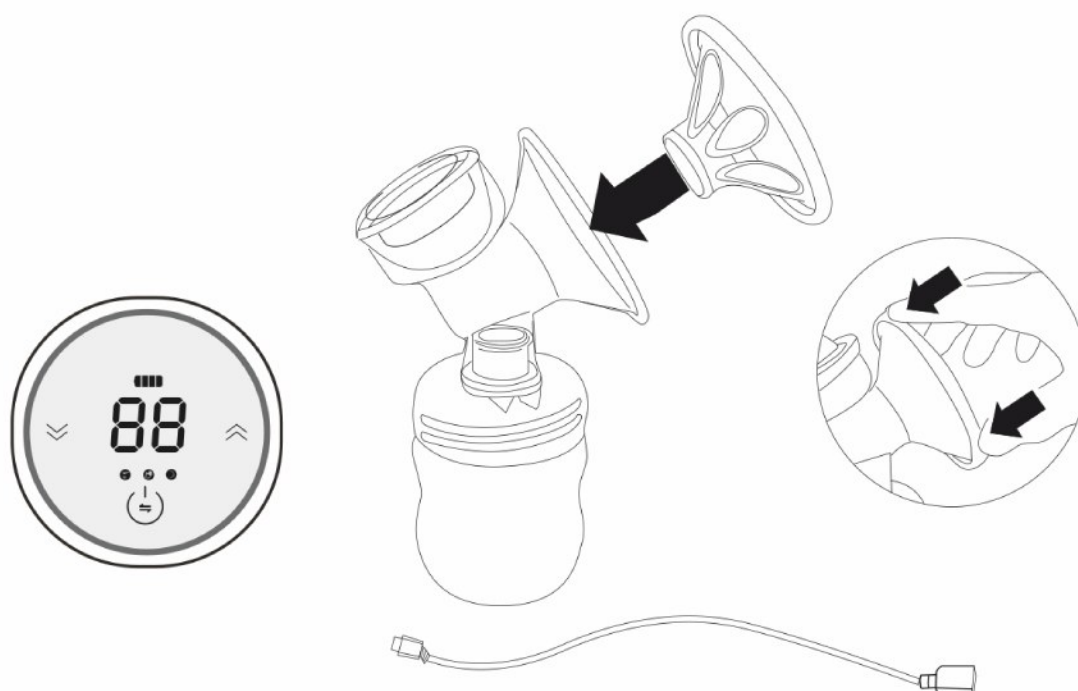

10. Проведення процедури

1. **Прийміть зручне** положення та розслабтеся.
2. **Розташуйте силіконову** насадку на грудях так, щоб сосок знаходився по центру.
3. **Увімкніть прилад** кнопкою живлення.
4. **Розпочніть процедуру** в режимі масажу обравши комфортний рівень потужності.
5. **Через 1–2 хвилини** перейдіть до режиму стимуляції для запуску припливу молока.
6. **Після початку** виділення молока увімкніть режим зціджування.
7. **Відрегулюйте рівень** потужності кнопками збільшення/зменшення до комфортного рівня.
8. **Проводьте зціджування** до отримання потрібного об'єму молока.
9. **Після завершення** зціджування увімкніть режим масажу ще на 1–2 хвилини.
10. **Вимкніть прилад, обережно** від'єднайте деталі та підготуйте молоко до зберігання.

Примітка: завершення процедури режимом масажу сприяє зменшенню напруження та підвищує комфорт після зціджування.

11. Можливі проблеми та рішення

Проблема	Причина	Рішення
Слабке всмоктування	Нещільний контакт	Перевірте діафрагму та клапан
Молоко не виходить	Стрес, мала потужність	Розслабтеся, змініть режим
Біль у грудях	Завелика потужність	Зменшіть потужність
Прилад не вмикається	Розряджена батарея	Зарядіть 1–2 години
Автовимкнення	Автостоп 30 хв	Це нормально, дайте відпочити
Молоко у з'єднувачі	Переповнена пляшечка	Вимкніть, промийте деталі

12. Очищення та дезінфекція

- Розберіть прилад:** від'єднайте насадку, пляшечку, клапан, діафрагму та клапан.
- Промийте всі деталі,** що контактують із молоком, у теплій воді **(40–50 °C)** з нейтральним дитячим миючим засобом без ароматизаторів і барвників.
- Ретельно сполосніть** деталі під проточною водою до повного видалення залишків миючого засобу.

Продезінфікуйте деталі одним зі способів:

- у паровому стерилізаторі для дитячого посуду;
- у спеціальних пакетах для стерилізації в мікрохвильовій печі;
- холодним методом — зануренням у розчин для стерилізації дитячих аксесуарів згідно з інструкцією виробника засобу.

Висушіть деталі на чистій поверхні в провітрюваному місці.

Не витирайте внутрішні поверхні — дайте їм висохнути природним шляхом.

Важливо: уникайте кип'ятіння та різких перепадів температур — вони можуть призвести до деформації силіконових деталей, втрати еластичності та зниження герметичності насадки.

Заборонено:

- **мити компресорний** блок водою або занурювати його в рідину;
- **обробляти компресор** агресивними засобами (хлор, концентрований спирт, абразивні матеріали).

Очищення компресорного блока виконуйте лише сухою або злегка вологою м'якою тканиною.

13. Зберігання та підігрів молока

Грудне молоко — цінний продукт. Дотримання правил зберігання та підігріву допомагає зберегти його поживні властивості, ферменти та імунні фактори.

Важливо: Під час заморожування заповнюйте пакет для зберігання грудного молока не більше ніж на $\frac{3}{4}$ об'єму, залишаючи місце для розширення.

Розморозуйте молоко в холодильнику або у воді температурою до **37 °C**.

Після розморозування обережно перемішайте молоко круговими рухами для рівномірного розподілу жиру. Розморожене молоко не підлягає повторному заморожуванню та не змішується зі свіжим.

Зберігання свіжозцідженого молока:

- за кімнатної температури (**до 25 °C**) — не більше 4 годин;
- у холодильнику (**до 4 °C**, на полиці, не на дверцятах) — **24 - 48** годин;
- у морозильній камері (**-18 °C** і нижче) — до 3 місяців.

Тара для зберігання: використовуйте чисті пляшечки з комплекту або спеціальні пакети для зберігання грудного молока

ArhiMED Gentle Bag. На кожній порції позначайте дату та час зціджування — це допоможе контролювати свіжість.

Розморожування: перемістіть молоко з морозильної камери до холодильника на **8–12** годин для поступового розморожування. Для швидкого розморожування використовуйте теплу проточну воду.

Підігрів молока: підігрівайте молоко у підігрівачі для дитячих пляшечок або у ємності з теплою водою (не вище **40 °C**). Перед годуванням обережно перемішайте молоко круговими рухами та перевірте температуру, нанісши кілька крапель на внутрішній бік зап'ястка — молоко має бути теплим, не гарячим.

Важливо: не використовуйте мікрохвильову піч для підігріву; не кип'ятіть молоко; не нагрівайте молоко повторно; розморожене молоко використовуйте протягом 24 годин; не заморожуйте повторно.

14. Зберігання приладу

Перед зберіганням переконайтеся, що всі знімні деталі чисті та повністю сухі.

- **Зберігайте прилад** у сухому, чистому та добре провітрюваному місці за кімнатної температури.
- **Уникайте підвищеної** вологості (ванна кімната), прямих сонячних променів, джерел тепла (батареї, обігрівачі) та різких перепадів температур.
- **Зберігайте прилад** у недоступному для дітей місці.
- **Не допускайте деформації** силіконових елементів — не залишайте насадку та клапан зім'ятими або затиснутими.

- **Не зберігайте прилад** поруч із побутовою хімією, парфумами та іншими леткими речовинами.

Догляд за акумулятором: якщо прилад тривалий час не використовується, повністю заряджайте акумулятор кожні 2–3 місяці. Не зберігайте прилад із повністю розрядженим акумулятором.

Важливо: перевіряйте стан силіконових деталей (клапан, діафрагма, насадка) перед кожним використанням. У разі виявлення тріщин, помутніння або втрати еластичності — замініть їх новими.

15. Гарантія та сервіс

Важливо: якщо корпус приладу має тріщини після падіння, сліди самостійного розкривання, впливу вологи всередині або пошкоджені пломби — гарантія анулюється.

Гарантія діє 36 місяців від дати покупки молоковідсмоктувача ARHIMED Gentle S3.

Гарантія покриває заводські дефекти основного блоку (компресора), LED-дисплея, кнопок керування та внутрішньої електроніки — за умови, що приладом користувалися згідно з цією інструкцією.

Гарантія також не покриває природний знос силіконових та витратних деталей — клапана, діафрагми, адаптивної насадки, соски та пакетів **ARHIMED Gentle Bag**, оскільки вони мають обмежений ресурс використання та потребують періодичної заміни.

**Якщо в тебе є будь-які питання щодо роботи приладу,
або раптом щось не виходить
скоріше дзвони або пиши нам у:**



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія



@ARHIMEDCARE