



# ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

**Аспіратор**  
ДИТЯЧИЙ

**EcoBreath**

**BASIC**

model



## 1. Вступ

**Дякуємо за вибір продукції ArhiMED**

Цей прилад призначений для швидкого та безпечного видалення слизу з носової порожнини дітей з перших днів життя.

**Перед початком експлуатації**

**уважно** прочитайте цю інструкцію.

Зберігайте її протягом усього терміну використання приладу.

## 2. Комплектація

- 1. Основний блок аспіратора - 1 шт.**
- 2. Накопичувальний резервуар для слизу - 1 шт.**
- 3. Силіконова насадка (Вузька) - 1 шт.**
- 4. Силіконова насадка (Універсальна) - 1 шт.**
- 5. Інструкція з експлуатації - 1 шт.**

## 3. Заходи безпеки та протипоказання



**УВАГА!** Недотримання цих правил може призвести до травмування або поломки приладу.

**Протипоказання до використання:**

- Носові кровотечі.
- Гострі травми голови, обличчя або шиї.
- Порушення згортання крові.
- Наявність відкритих ран або запалень у носовій порожнині.

## Правила безпеки:


- 1.  ЗАБОРОНЕНО** перевертати прилад, коли в резервуарі є рідина. Слиз може потрапити в мотор, що призведе до виходу з ладу (нега-рантійний випадок).
- 2.  ЗАБОРОНЕНО** занурювати ос-новний блок (мотор) у воду.
- 3. Використовуйте прилад тільки** за призначенням (очищення носа).
- 4. Зберігайте у недоступному** для дітей місці. Прилад містить дрібні деталі.
- 5. Не використовуйте** прилад без силіконової насадки.

## 4. Технічні характеристики

| Параметр           | Значення                      |
|--------------------|-------------------------------|
| модель             | EcoBreath Basic               |
| Тип живлення       | 3V (2 батарейки типу AA)      |
| Рівень шуму        | 40 дБ                         |
| Максимальний тиск  | 80 кПа                        |
| Умови експлуатації | +10°C...+40°C, вологість <85% |


## 5. Підготовка до роботи

1. Відкрийте батарейний відсік, зсунувши кришку вниз.

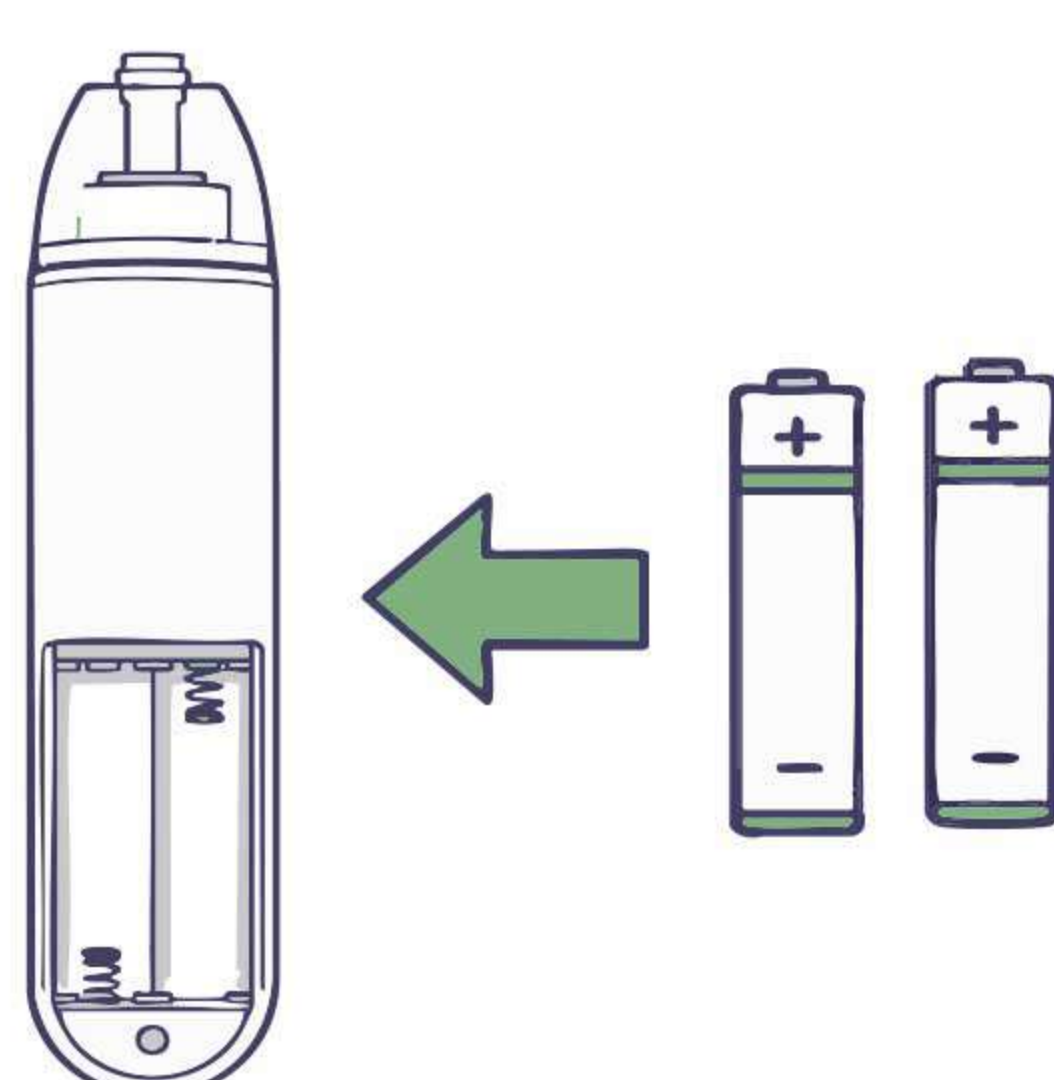


2. **ВАЖЛИВО:** Встановіть 2 нові лужні (Alkaline) батарейки типу AA. Дотримуйтесь полярності (+/-).

**Примітка:** Не використовуйте сольові (Zinc-Carbon) батарейки або акумулятори 1.2В — їхньої потужності недостатньо для створення необхідного вакууму.

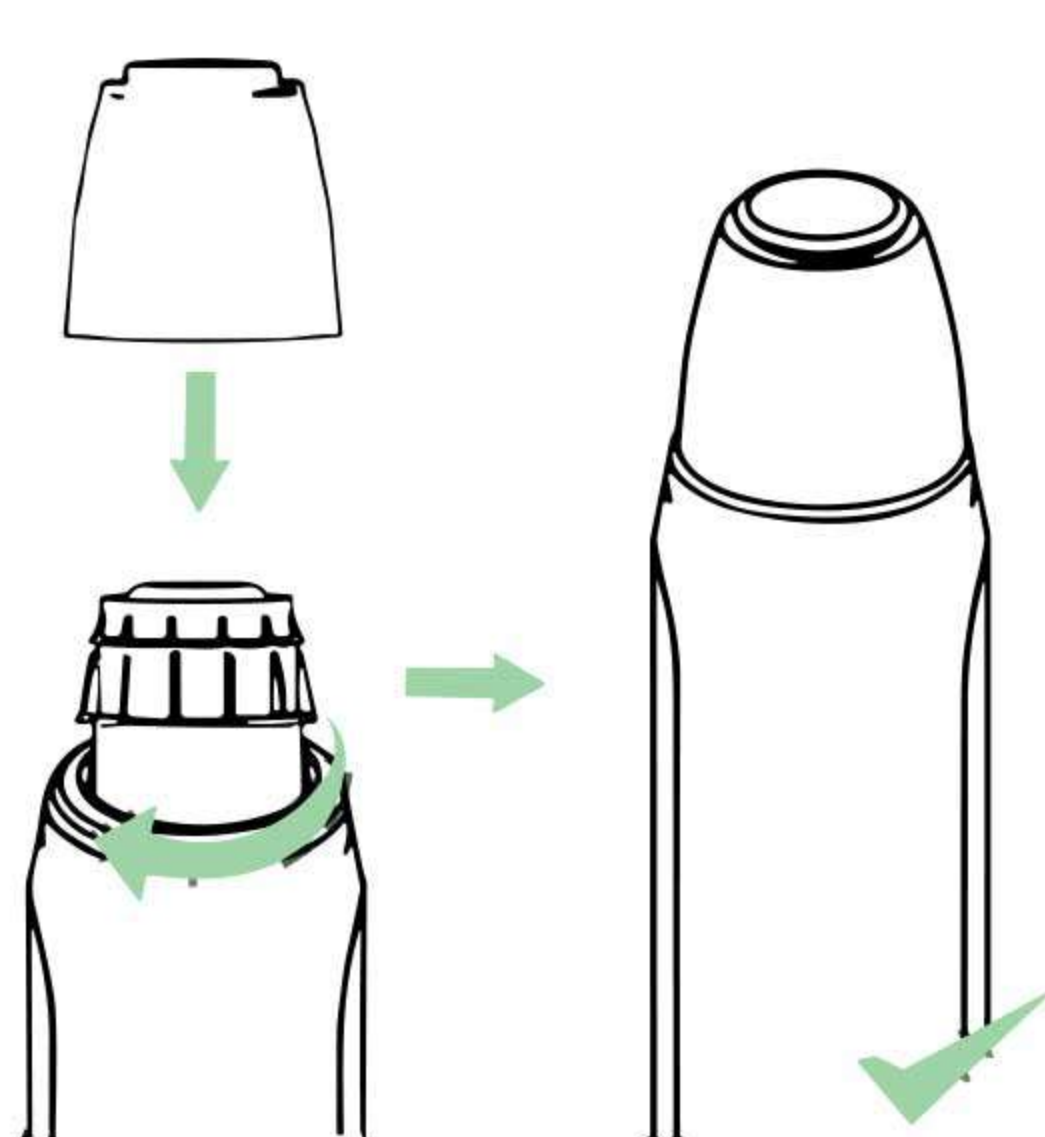


3. Встановіть прозорий резервуар на блок, переконавшись, що гумове кільце ущільнювача на місці.

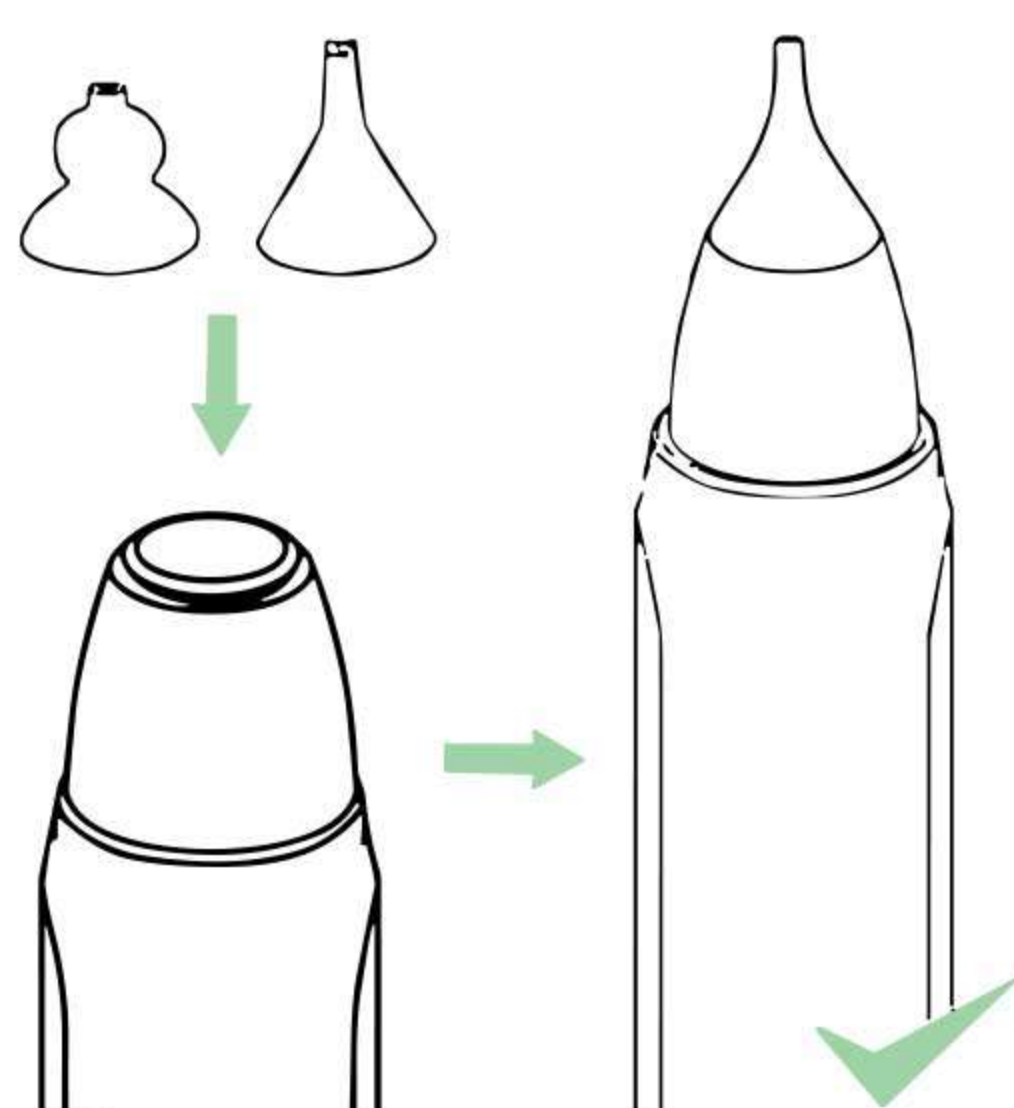

4. Оберіть насадку та щільно надіньте її на резервуар.

## 6. Порядок використання

- 1. Зволоження:** Якщо слиз густий або сухий, обов'язково закапайте в ніс фізіологічний розчин (сольовий розчин) і зачекайте 2-3 хвилини. Це критично для ефективності.

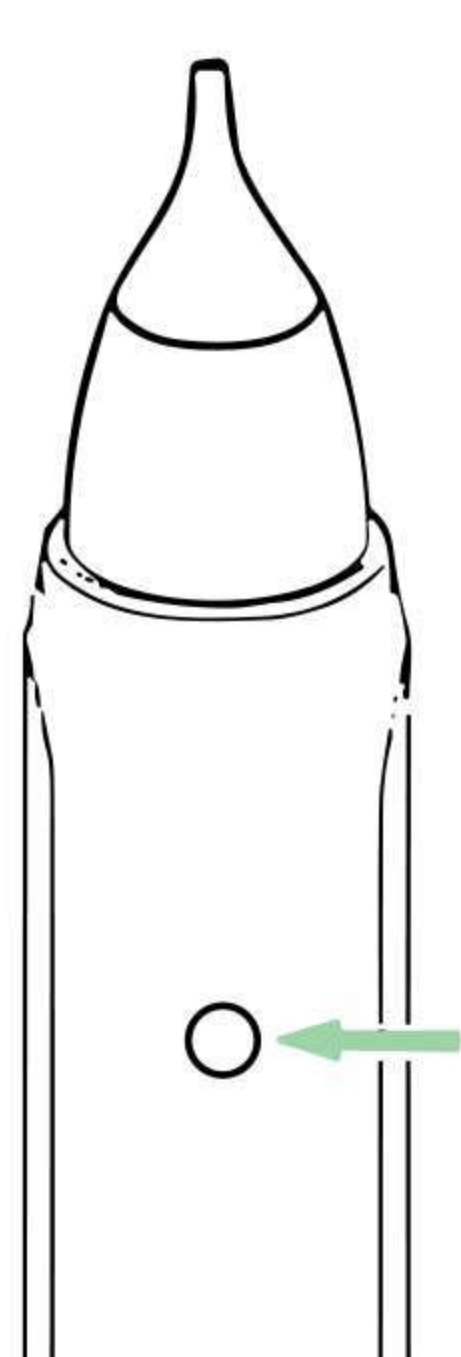

- 2. Натисніть кнопку живлення для ввімкнення.**



- 3. Обережно вставте кінчик силіконової насадки в носовий отвір, насадка має щільно, але м'яко прилягати до стінки носика. Не вводьте насадку занадто глибоко.**
- 4. Тримайте аспіратор вертикально або під кутом не більше 45 градусів.**
- 5. Після процедури вимкніть прилад.**

## 7. Очищення та Догляд

- **Після кожного використання:**  
Від'єднайте насадку та прозорий резервуар. Промийте їх теплою водою з м'яким миючим засобом.
- **Дезінфекція:** Силіконові насадки можна обробляти теплою водою (до 50°) (не довше 1 хвилини). Резервуар (пластик) не рекомендується кип'ятити, щоб уникнути деформації.
- **Корпус:** Протирайте м'якою, злегка вологою тканиною. Не використовуйте абразиви або розчинники.

## 8. Зберігання та Транспортування

**Виймайте батарейки**, якщо не плануєте користуватися приладом понад 14 днів.

**Зберігайте при температурі** від -10°C до +50°C, уникаючи прямих сонячних променів.

## 9. Усунення несправностей

| Проблема               | Можлива причина                                                                         | Рішення                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не вмикається          | Батарейки розряджені<br>або встановлені<br>неправильно                                  | Перевірте полярність.<br>Встановіть нові<br>Alkaline<br>батарейки                                                    |
| Слабка тяга            | 1. Батарейки втратили<br>ємність.<br>2. Немає герметичності.<br>3. Слиз занадто густий. | 1. Замініть батарейки.<br>2. Перевірте ущільнювальне<br>кільце та щільність насадки.<br>3. Використовуйте фізрозчин. |
| Гучний звук / Вібрація | Резервуар встановлено<br>не рівно                                                       | Зніміть і встановіть<br>резервуар заново до<br>кляцання                                                              |

## Сервіс та гарантія

- Гарантійний термін починається з дати придбання виробу, зазначеної у розрахунковому документі.

Гарантія втрачає чинність у випадках:

- Використання виробу з порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- Пошкодження виробу внаслідок умисних або необережних дій споживача;
- Наявності механічних або інших зовнішніх ушкоджень;
- Потрапляння всередину виробу рідин, пилу, комах або сторонніх предметів;
- Самовільного розбирання виробу або будь-якого іншого стороннього втручання в його конструкцію.
- Гарантія не поширюється на несправності, спричинені:
- Природним зносом деталей, що мають обмежений строк служби;
- Унаслідок форс-мажорних обставин: нещасний випадок, пожежа, повінь тощо).

**Якщо в тебе є будь-які питання  
щодо роботи приладу,  
або раптом щось не виходить  
скоріше дзвони або пиши нам у:**



Viber

або



Telegram

**+38 (073) 853 38 51**

Підтримка, Сервіс, Гарантія