



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Аспіратор
ДИТЯЧИЙ

ArhiMED
EcoBreath

PRO

model



1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ

Дякуємо, що обрали ArhiMED!

Електричний аспіратор EcoBreath PRO розроблений для зручного, практичного та ефективного очищення носа від слизу.

2 КОМПЛЕКТАЦІЯ

Перевірте наявність усіх компонентів перед використанням:

- 1 Основний блок (мотор) — 1 шт.
- 2 Аспіраційний резервуар для слизу — 1 шт.
- 3 Силіконова насадка (Вузька) — 1 шт.
- 4 Силіконова насадка (Широка) — 1 шт.
- 5 Кабель для зарядки (Micro-USB) — 1 шт.
- 6 Інструкція користувача — 1 шт.
- 7 Поролонові фільтри — 5 шт.



3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель	EcoBreath PRO
Гарантія	12 місяців
Живлення	Акумулятор (400 mAh)
Час повної зарядки	~ 2 години
Макс. тиск вакууму	110 кПа
Умови експлуатації	+10°C...+40°C, вологість ≤85%



УВАГА! Недотримання цих правил може призвести до травмування або поломки приладу.

Протипоказання до використання:

- Носові кровотечі.
- Гострі травми голови, обличчя або шиї.
- Наявність відкритих ран або запалень у носовій порожнині.
- Пошкодження слизової оболонки носа.

У разі виникнення будь-якого дискомфорту або больових відчуттів у дитини під час процедури — негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.

Правила безпеки:

-  **ЗАБОРОНЕНО** перевертати прилад, коли в резервуарі є рідина. Слиз може потрапити в мотор, що призведе до виходу з ладу (не гарантійний випадок).
-  **ЗАБОРОНЕНО** занурювати основний блок (мотор) у воду або під струмінь води.
- **Використовуйте прилад** тільки за призначенням (очищення носа).
- **Зберігайте у недоступному** для дітей місці. Прилад містить дрібні деталі.
- **Не допускайте** сильних ударів або падіння приладу.
- **Не використовуйте** прилад без силіконової насадки.

Зарядка: Перед першим використанням повністю зарядіть прилад (приблизно 2 години).



Індикатор блимає — триває заряджання



Індикатор світиться — заряджено

Вибір насадки: Виберіть силіконовий наконечник відповідно до анатомічних особливостей носа дитини та консистенції носового слизу:

Вузький наконечник

Рекомендується для видалення рідкого слизу.

Широкий наконечник

Рекомендується для видалення густішого слизу.

Переконайтеся, що обрана насадка надійно закріплена та щільно приєднана до резервуару аспіратора перед початком процедури.

Збірка: Приєднайте аспіраційний резервуар до основного блоку (до щільної фіксації).

6 ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

1: Зволоження (Важливо!)

Якщо слиз густий або сухий, обов'язково закапайте в ніс дитині фізіологічний розчин (сольовий розчин) за 2–5 хвилин до процедури. Це критично для ефективності.

2: Процедура:

- 1** Затисніть кнопку живлення на 3 секунди, щоб увімкнути прилад.
- 2** Встановіть силіконовий наконечник:
Вузький — для рідкого слизу,
Широкий — для густішого.

- 3 Помістіть дитину у вертикальне положення. Обережно та не дуже глибоко вставте силіконовий наконечник в ніздрю дитини. Насадка має щільно, але м'яко контактувати з краєм носика для створення вакууму. Будьте уважні — наконечник не повинен впирається в задню стінку носового проходу.
- 4 Натисніть кнопку на приладі для початку процесу видалення слизу. Тривалість безперервного всмоктування — кілька секунд. Робіть паузи між процедурами.

3: Завершення

Вимкніть прилад, затиснувши кнопку живлення. Від'єднайте наконечник та резервуар для подальшого очищення.

Примітка: Для ефективності роботи аспіратора рекомендується проводити очищення силіконового наконечника в інтервалах між використаннями.

7 ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після кожного використання:

- 1 Від'єднайте верхню частину (наконечник та резервуар).
- 2 Промийте силіконові наконечники та резервуар під струменем теплої проточної води.
- 3 Промийте резервуар для слизу під теплою проточною водою.
- 4 Замініть поролоновий фільтр.
- 5 Просушіть всі деталі та складіть прилад після повного висихання.



Дезінфекція (раз на тиждень):

- **Силіконові наконечники:** Можна кип'ятити (не більше 30 сек) або обробляти антисептиком (Хлоргексидин).
- **Резервуар (пластик):** Промивати гарячою водою (не окропом), обробляти антисептиком.
- **Моторний блок:** Протирати лише злегка вологою серветкою. Не занурювати у воду!

Не проводьте очищення за допомогою абразивних чистячих засобів, бензину або розчинника. Не зберігайте прилад при надмірно високій або низькій температурі та підвищеній вологості.

Умови зберігання:

- Завжди зберігайте аспіратор у чистоті.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не зберігайте під прямими сонячними променями.

Проблема	Причина	Рішення
Прилад не вмикається	Розряджений акумулятор. Кнопка вмикання натиснута недостатньо довго.	Зарядіть прилад.
Слабке всмоктування / звук зникає	Забруднений наконечник або накопичувальний резервуар.	Очистіть аспіраційний блок та наконечник.
Прилад не починає аспірацію	Переповнений резервуар для слизу або забруднений наконечник.	Очистіть та промийте резервуар і блок.
Рідина потрапила в корпус	Перевертання приладу з рідиною в резервуарі.	НЕ ВМИКАТИ! Висушіть прилад (мінімум 24 год). Якщо не працює — зверніться в сервіс.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати купівлі.

Гарантія втрачає силу у випадках:

- Механічні пошкодження (падіння, удари).
- Потрапляння рідини всередину моторного блоку (недотримання інструкції).
- Самостійний ремонт або розбирання корпусу.
- Природний знос витратних матеріалів (силіконові насадки, ущільнювачі).
- Дія непередбаченої сили (аварія, повінь, пожежа тощо).

**Якщо в тебе є будь-які питання щодо роботи приладу,
або раптом щось не виходить
скоріше дзвони або пиши нам у:**



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія

