

ІНСТРУКЦІЯ з використання

Пульсоксиметр
PulsePro **X1**

ArhiMED



Пульсоксиметр ArhiMED PulsePro X1

Дякуємо за довіру та вибір Пульсоксиметра ArhiMED PulsePro X1.

Це компактний електронний прилад, призначений для контролю рівня насичення крові киснем та частоти пульсу. Прилад забезпечує можливість регулярного спостереження за показниками фізіологічного стану дитини в домашніх умовах.

У цій інструкції наведено інформацію про функціональні можливості приладу, правила користування та умови безпечної експлуатації.

Зміст

- 1 Зовнішній вигляд та функції
- 2 На дисплеї відображаються такі дані
- 3 Комплектація та пакування
- 4 Що вимірює пульсоксиметр
- 5 Хто і в якій ситуації може користуватися
- 6 Правила експлуатації
- 7 Умови гарантії та сервіс



1 Зовнішній вигляд та функції

Пульсоксиметр ArhiMED PulsePro X1 має компактну та ергономічну конструкцію, що забезпечує зручне використання для людей різного віку. Завдяки продуманому механізму, пристрій гарантує надійну, але м'яку фіксацію на пальці без відчуття надмірного тиску.



Прилад оснащений яскравим кольоровим OLED-дисплеєм з функцією автоматичної зміни орієнтації екрана (автоповорот), що дозволяє комфортно зчитувати дані з будь-якого ракурсу.

2 На дисплеї відображаються такі дані

- 1 Індикатор заряду батареї
- 2 Частота пульсу (PR) — кількість серцевих скорочень за хвилину.
- 3 Плетизмограма — графічне відображення пульсової хвилі.
- 4 Рівень сатурації крові SpO_2 — відсоткове значення насичення крові киснем.
- 5 Індекс перфузії (PI) — показник якості кровообігу в місці вимірювання, який впливає на точність результатів.



Функції приладу:

- вимірювання SpO_2 та частоти пульсу (PR);
- відображення плетизмограми;
- звукове оповіщення при виході показників за межі;
- індикація заряду батареї;
- автоматичне вимкнення.

На верхній панелі розташована мультифункціональна кнопка.

Одиночне натискання на кнопку вмикає пристрій, наступні натискання змінюють орієнтацію екрана. У разі затискання кнопки протягом декількох секунд на екрані виводиться меню з налаштуванням пульсоксиметра. Зміну налаштувань параметрів проводять подальшим триманням кнопки протягом кількох секунд:

Alm — увімкнення оповіщення (ON/OFF).

BEEP — увімкнення / вимкнення звукового сигналу.

SpO₂ Alm Lo — оповіщення про низький рівень кисню (якщо значення нижче за встановлене).

PR High Alm — оповіщення про високий пульс (якщо значення вище за встановлене).

PR Low Alm — оповіщення про низький пульс (якщо значення нижче за встановлене).

Restore — скидання до заводських налаштувань (утримуйте кнопку). За замовчуванням: Alm – Off, SpO₂ High – 99, SpO₂ Low – 90, PR High – 120, PR Low – 50.

+/- — зміна значень для лімітів SpO₂ та PR.

Exit — вихід із меню налаштувань.

На нижній частині пульсоксиметра розташований відділ для батарейок. Працює пульсоксиметр від 2-х батарейок типу AAA, які входять до комплекту. Рівень заряду батарейок відображається на екрані дисплея у вигляді відповідного індикатора. Пульсоксиметр має вбудовану

систему збереження заряду батарей, пристрій автоматично вимикається через 8 секунд у разі бездіяльності. Прилад може працювати близько 30 годин до повного розрядження батарей.

3 Комплектація та пакування

До комплекту входить:

- 1 пульсоксиметр ArhiMED PulsePro X1;
- 2 батарейки - 2 шт. типу AAA;
- 3 інструкція з використання;
- 4 шнурок



4 Що вимірює пульсоксиметр

Пульсоксиметр ArhiMED PulsePro X1 вимірює:

SpO² - рівень насичення крові киснем;

PR - частота серцевих скорочень (пульс).

Контроль цих показників дозволяє відстежувати стан дихальної та серцево-судинної систем. Зверніть увагу, що на точність результатів можуть впливати активні рухи, температура рук, а також якість місцевого кровообігу.



5 Хто і в якій ситуації може користуватися

Пульсоксиметр призначений для самостійного контролю показників здоров'я в домашніх умовах.

Рекомендований для застосування:

у стані спокою або під час сну;

після перенесених респіраторних захворювань;

за рекомендацією лікаря для моніторингу показників;

у період реабілітації та відновлення після хвороб.

Прилад не призначений для постановки діагнозу та не замінює консультацію лікаря.

6 Правила експлуатації

Вимірювання проводьте лише у спокійному стані.

Не використовуйте прилад під час активних рухів.

Не допускайте потрапляння вологи всередину приладу.

Протирайте корпус сухою або злегка зволоженою серветкою.

Після очищення дайте приладу повністю висохнути.

Уникайте падінь та сильного механічного впливу.

7 Умови гарантії та сервіс

На товари бренду ArhiMED надається повна гарантія терміном 24 місяці з дати покупки. Безкоштовний ремонт здійснюється лише у разі виявлення заводських дефектів за умови дотримання правил експлуатації.

Гарантія не поширюється на:

Зовнішні пошкодження: подряпини, тріщини корпусу та інші дефекти, що не впливають на роботу пристрою.

Витратні матеріали: батарейки, акумулятори та деталі з обмеженим терміном служби.

Якщо в тебе є будь які питання по роботі приладу, або раптом щось не виходить скоріше дзвони або пиши нам у:



Viber

або



Telegram

+38 (073) 853 38 51

Підтримка, Сервіс, Гарантія



@ARHIMEDCARE